

**Código Interno:** EP434

**Descrição:** EP Pesquisa de Mutaç o - Protrombina

A validade deste controle   garantida desde que seguidas  s informa es contidas nesta ficha.

**1 - Identifica o da Empresa:**

Controllab Controle de Qualidade para Laborat rios Ltda.  
Endere o: Rua Ana Neri, 416 – Benfca – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20911-442  
Telefone para Contato: 55 21 3891-9900  
E-mail: [atendimento@controllab.com.br](mailto:atendimento@controllab.com.br)

**2 - Composi o:**

Sangue humano liofilizado com adi o de estabilizadores.

**3 – Caracter stica do Material:**

Sangue humano liofilizado.

**4 – Apresenta o:**

Dois itens, em microtubo est ril, cada um contendo 500 µL de amostra.

**5 – Condi es de Transporte:**

Seguir as instru es especificadas na embalagem; n o transportar com materiais que possam transmitir odor ou contaminar de forma direta ou indireta.

**6 – Condi es de Armazenamento:**

Armazenar em temperatura inferior a 0  C; separado de materiais que possam transmitir odor ou contaminar de forma direta ou indireta.

**7 – Condi es de Manuseio / Situa es de Emerg ncia:**

Deve-se adotar os procedimentos de Biosseguran a N vel 2, Precau es Universais e Boas Pr ticas Laboratoriais durante a manipula o deste material de controle at  o seu completo descarte.

Este material deve ser manuseado apenas por pessoal com forma o adequada em procedimentos laboratoriais e familiarizado com as boas pr ticas de laborat rio. Utilizar Equipamento de Prote o Individual (EPI) com Certificado de Aprova o emitido pelo  rg o regulador. As m os devem ser lavadas mesmo ap s o uso de luvas.

Situa es de Emerg ncia, consultar a Ficha de Dados de Seguran a, dispon vel no site da Controllab.

**8 – Disposi o:**

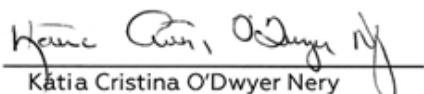
Todos os materiais biol gicos de origem humana e/ou animal e outros materiais potencialmente infecciosos devem ser descontaminados e eliminados de forma adequada como material infeccioso. Descarte os res duos de acordo com as regula es nacionais, regionais ou locais aplic veis.

Cabe   empresa usu ria do material de controle definir os procedimentos para descarte deste material no seu Plano de Gerenciamento de Res duos de Servi os de Sa de.

Descartar as embalagens de acordo com as regula es nacionais, regionais ou locais aplic veis.

**9 – Informa es T cnicas / Aplica es:**

Uso para Ensaio de Profici ncia a fim de determinar o desempenho da fase anal tica do laborat rio.

  
K tia Cristina O'Dwyer Nery

**Respons vel T cnica**

Revis o 02 – Data da  ltima Revis o: 20/10/2022

P gina 1 de 1